

LODI IMPLANTAT

Ideal für ganz oder teilweise zahnlose Patienten mit starkem Knochenabbau und schmalen Kieferkamm.

Packungsinhalt:

- (1) LOCATOR Aufbau
- (2) LODI Implantat
- (3) LODI Male Processing Pack



Smarter thinking. Simpler design.™




INTUITIVE UND SICHERE INSTRUMENTE FÜR EINE EINFACHE HANDHABUNG

CHIRURGIE-KASSETTE

Alle Locator Overdenture Instrumente haben eine Laser- und Tiefenmarkierung zur Erleichterung der Knochenbohrung und Implantatplatzierung.

Beinhaltet ein Set mit Bohrstopps für eine zusätzliche Tiefenkontrolle. Diese Funktion bietet Ihnen zusätzliche Sicherheit während der Vorbohrung, vor allem bei der laparösen OP-Technik.

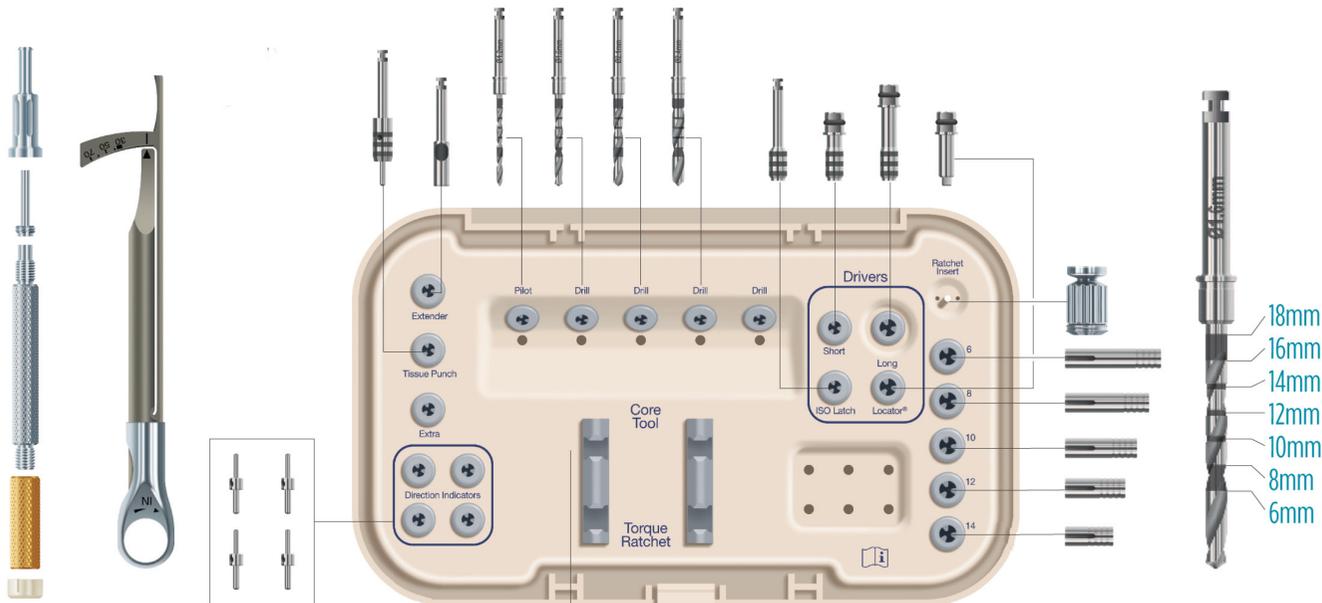

LOCATOR® OVERDENTURE IMPLANTAT SYSTEM (LODI)



Ein schlanker Implantatdurchmesser mit LOCATOR®, dem weltweit führenden Deckprothesenaufbau



KNOCHENTYP	FINALER BOHRDURCHMESSER		TIEFENBOHRER
	Implantat-durchmesser 2,4 mm	Implantat-durchmesser 2,9 mm	
D1	2,1 mm	2,4 mm	Implantatlänge
D2/D3/D4	1,6 mm	2,1 mm	4 mm weniger als die Implantatlänge

Klassifizierung der Knochentypen. Die Knochenqualität muss von dem behandelnden Arzt durch Vordiagnostik und während der Operation bestimmt werden, um den entsprechenden Drehmoment für die gewünschte Osteotomiegröße zu erzielen.

Keystone Dental GmbH

Jägerstraße 66
53347 Alfter, Deutschland
Tel : +49 (0) 2222-92940
Gebührenfreie Rufnr.: 0800 1844 168
Fax : +49 (0) 3222-9989247
info.de@keystonedental.com




www.keystonedental.com

MK40245-GE Rev B 11/2013
©2013 Keystone Dental, Inc.

EINFACHE BOHRSEQUENZ FÜR ALLE KNOCHENTYPEN

BESCHREIBUNG

Zum Beispiel: Lappenlose OP-Technik für ein 2,4 mm x 12 mm Implantat

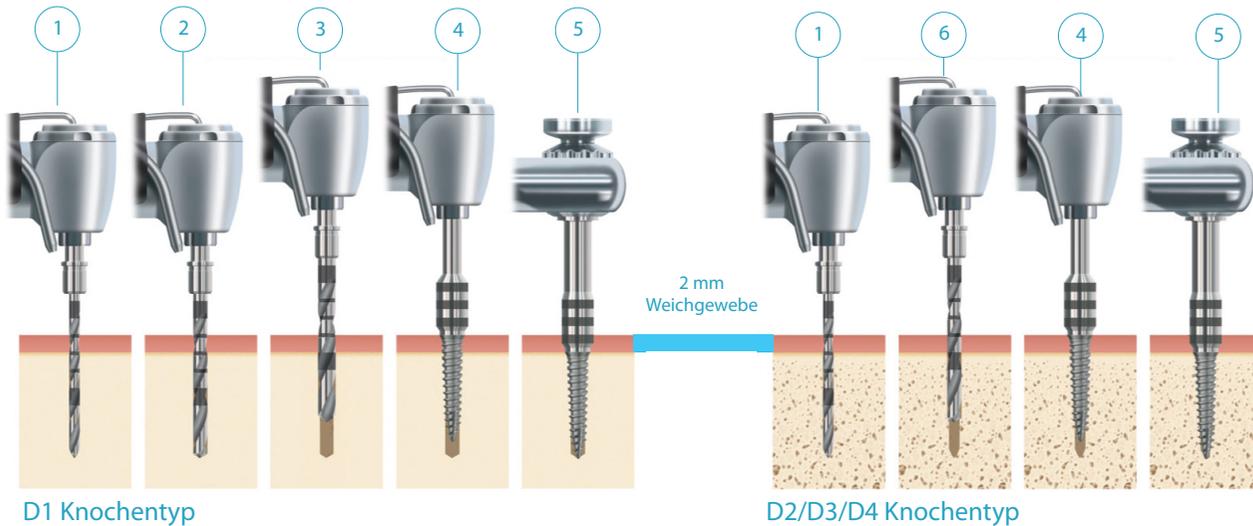

BOHRSEQUENZ

- | | |
|---|--|
| 1 1,2 mm Pilotbohrer mit Tiefenmarkierung 14 mm | 4 Gewinde bis zum ersten Stopp eindrehen |
| 2 1,6 mm Bohrer mit Tiefenmarkierung 14 mm | 5 Implantat mit der Ratsche bis zur vorher bestimmten Tiefe eindrehen |
| 3 2,1 mm Bohrer mit Tiefenmarkierung 10 mm | 6 (D2/D3/D4 Knochentyp) 1,6 mm Bohrer mit 10 mm Tiefenmarkierung (4 mm kürzer) |

ART-NR. **2,4 mm LODI Implantate, 2,5 mm Aufbau**

- 07450 LODI 2,4 mm x 10 mm, 2,5 mm
- 07451 LODI 2,4 mm x 12mm, 2,5 mm
- 07452 LODI 2,4 mm x 14 mm, 2,5 mm

ART-NR. **2,4 mm LODI Implantate, 4,0 mm Aufbau**

- 07455 LODI 2,4 mm x 10 mm, 4,0 mm
- 07456 LODI 2,4 mm x 12 mm, 4,0 mm
- 07457 LODI 2,4 mm x 14 mm, 4,0 mm

ART-NR. **2,9 mm LODI Implantate, 2,5 mm Aufbau**

- 07460 LODI 2,9 mm x 10 mm, 2,5 mm
- 07461 LODI 2,9 mm x 12 mm, 2,5 mm
- 07462 LODI 2,9 mm x 14 mm, 2,5 mm

ART-NR. **2,9 mm LODI Implantate, 4,0 mm Aufbau**

- 07465 LODI 2,9 mm x 10 mm, 4,0 mm
- 07466 LODI 2,9 mm x 12 mm, 4,0 mm
- 07467 LODI 2,9 mm x 14 mm, 4,0 mm

ART-NR. **LODI LOCATOR Aufbauten**

- 07351 LODI LOCATOR Aufbau, 2,5 mm Höhe
- 07352 LODI LOCATOR Aufbau, 4,0 mm Höhe

ART-NR. **Premium Chirurgie Kasette**

- 07422 Beinhaltet alle LODI chirurgischen Instrumente außer den 1,8 mm und 2,6 mm Bohrern