

# Pro-Tip<sup>®</sup> **TURBO**

by Astek Innovations Ltd



**LOSER & CO**  
*öfter mal was Gutes...*



# Einwegansätze für die Multifunktionspritze

Erstklassige **Präzision** | Optimales **Design** | **Überragende Zuverlässigkeit**



## **Sichere Trennung von Luft und Wasser durch das 2-Kanalsystem – garantiert!**

Ein sauberer und trockener Luftstrom – die absolute Voraussetzung für die meisten zahnärztlichen Behandlungen. Pro-Tip Turbo hat ein einzigartiges Zwei-Kanal-System zur Trennung von Luft und Wasser. Dadurch ist in jeder Behandlungssituation trockene und saubere Luft verfügbar. Pro-Tip Turbo sichert zudem eine perfekte Sprayfunktion.

- **Neue Hochleistungs-Luftdüse**
- **Verhindert Kreuzkontaminationen**
- **Jederzeit trockene Luft und perfekte Sprayfunktion**
- **Sicherer Halt durch exklusives Bajonett-Verriegelungssystem**
- **Zuverlässige Trennung von Luft und Wasser**
- **Stabiles Design ermöglicht das Abhalten der Wange**
- **Passt auf alle verfügbaren Pro-Tip Adapter**



## Mit Pro-Tip einfach die RKI-Richtlinien erfüllen


Die RKI-Richtlinien fordern einen hygienisch aufbereiteten Spritzenansatz für jeden Patienten.

Pro-Tip Turbo sind hygienische Einwegansätze für fast jede Funktionsspritze. Das Pro-Tip System garantiert beste Funktionalität, ist einfach anwendbar und äußerst kostengünstig, da die aufwändige Reinigung entfällt.

Beseitigen Sie das Infektionsrisiko bei der Funktionsspritze einfach und endgültig!

# Modifikationen und Eigenschaften


Erstklassige **Präzision** | Optimales **Design** | **Überragende Zuverlässigkeit**



Bajonettverschluss sichert den Ansatz am Adapter, verhindert somit ein „Wegblasen“ und hilft den Wasserkanal abzudichten.




## Adapter



Wasserkanal, abgedichtet mit einem Silikon-Gummiring

Wasserkanal



Wasser fließt vom zentralen Wasserkanal des Adapters in den des Pro-Tip Turbo, und garantiert so, dass kein Wasser in den Luftkanal eindringt.




**Neu:  
konisch  
geformt**

**Neue Hochleistungs-Luftdüse**  
Luft wird mit starkem Druck aus dem neuen, konischen Endstück gepresst. Aufgrund des neuen Designs ist der Luftdruck im Vergleich zu den bisherigen Pro-Tips noch höher, ohne die Grundeinstellung an der Einheit zu modifizieren.



Luftdruck bei 60 psi

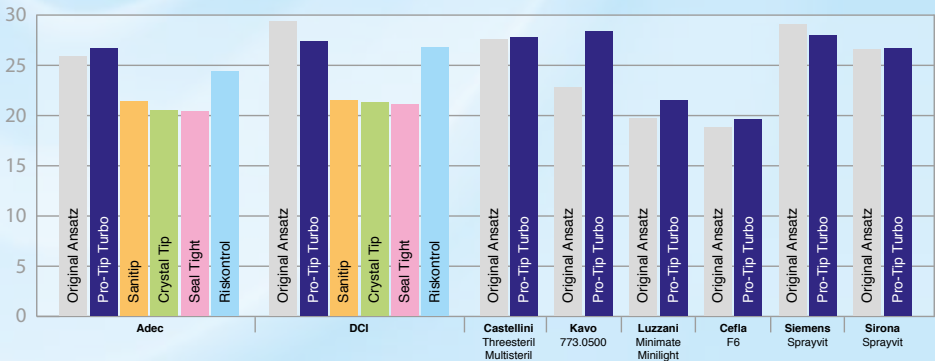

# Adapter und Montage

Erstklassige Präzision | Optimales Design | Übertreffende Zuverlässigkeit

## Wählen Sie Ihren Adapter aus

Passgenau entwickelt für folgende Spritzen

<p><b>Siemens</b> Sprayvit 4000, A1-, E1- und M1- Einheiten</p>  <p><b>SIEMENS</b> Art.-Nr.: <b>SM117</b></p>	<p><b>Sirona</b> Sirona Sprayvit</p>  <p><b>SIRONA</b> Art.-Nr.: <b>SE137</b></p>	<p><b>Kavo</b> 773.0000 773.0010</p>  <p><b>KAVO</b> Art.-Nr.: <b>KA139</b></p>	<p><b>Kavo</b> 773.0500</p>  <p><b>KAVO</b> Art.-Nr.: <b>KA138</b></p>	<p><b>Kavo</b> 573.0620 573.0630</p>  <p><b>KAVO</b> Art.-Nr.: <b>KA101</b></p>
<p><b>Kavo</b> 573.0520 573.0530</p>  <p><b>KAVO</b> Art.-Nr.: <b>KA103</b></p>	<p><b>Luzzani</b> Minilight F3 F6, Minimate F3 F6</p>  <p><b>LUZZANI</b> Art.-Nr.: <b>LU135</b></p>	<p><b>Luzzani</b> Minimatic</p>  <p><b>LUZZANI</b> Art.-Nr.: <b>LU142</b></p>	<p><b>Cefla</b> Serie 2007, F3, F6, Anthos, Stern Weber und Cas- tellini Einheiten</p>  <p><b>LUZZANI</b> Art.-Nr.: <b>LU146</b></p>	<p><b>Adec Style</b> Spritzen</p>  <p><b>ADEC</b> Art.-Nr.: <b>AD106</b></p>

## Einfache Installation

1. Nehmen Sie den bestehenden Spritzenansatz und/oder Adapter ab. Bringen Sie im Anschluss den Pro-Tip Adapter an.

2. Drücken Sie den Pro-Tip Ansatz in den Adapter. Drehen Sie ihn im Anschluss, während Sie gleichzeitig den Adapter festhalten, um einen festen Sitz dank Bajonettverschluss zu sichern.

3. Der Pro-Tip Ansatz ist sicher am Adapter angebracht, wenn die Lamellen in eine Linie gebracht sind.



Faro



**FARO**  
Art.-Nr.:  
**FA125**

Faro




**FARO**  
Art.-Nr.:  
**FA145**

Faro  
Metallspritze




**FARO**  
Art.-Nr.:  
**FA126**

Ritter

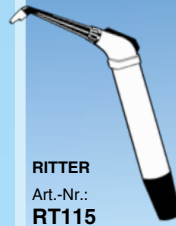

**RITTER**  
Art.-Nr.:  
**RT115**

DCI  
DCI, Belmont,  
Press Ring  
Spritzen

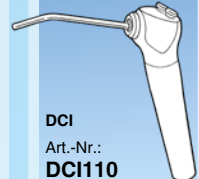

**DCI**  
Art.-Nr.:  
**DCI110**

Castellini  
Threesteril,  
Multisteril,  
(Puma Einheiten)




**CASTELLINI**  
Art.-Nr.:  
**CA136**

Castellini  
Solar, Polo, Area,  
Firma




**CASTELLINI**  
Art.-Nr.:  
**CA109**

Belmont

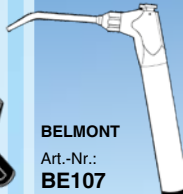

**BELMONT**  
Art.-Nr.:  
**BE107**

Chirana

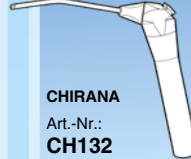

**CHIRANA**  
Art.-Nr.:  
**CH132**

Cefla  
Serie 2012,  
Anthos, Stern  
Weber, Castellini



**CEFLA**  
Art.-Nr.:  
**CE153**



## Pro-Tip® SLEEVE

**Mehr Sicherheit für die Multifunktionsspritze**  
Mit Pro-Tip Sleeve ist nun ein kompletter hygienischer Schutz für Ihre Multifunktionsspritze verfügbar. Die kostengünstigen, transparenten Einwegschutzhüllen werden einfach über die Spritze gezogen und decken den Handgriff während der Behandlung zuverlässig ab.  
Box mit 250 Stück – Art.-Nr.: PTS150.

## Pro-Syringe

**Sie brauchen eine neue Multifunktionsspritze?**  
Pro-Syringe ist eine 3-Wege Funktionsspritze, die durch überragende Lebensdauer und optimale Funktionalität überzeugt. Der integrierte Adapter in Kombination mit den Pro-Tip Ansätzen sichert eine gleichmäßige Luft- und Wasserzufuhr, verhindert Kreuzkontaminationen und erspart die Wiederaufbereitung.

# Preisübersicht und Bestellung

Starter-Kit | Nachfüllpackungen | Adapter | Pro-Syringe

**FAXBESTELLUNG AN +49 (0) 21 71/70 66 66**

## Starter Kit Adapter + 50 Pro-Tip Turbo

**74,70 €**

Bitte Artikelnummer des entsprechenden Adapters aus der folgenden Liste übernehmen. Weitere Adapter a. A. erhältlich.

Adapter:  Menge:

<b>AD 106</b>	ADEC	<b>KA 101</b>	KAVO (Systematica 1061, # 57306-10/-20/-30/-40)
<b>BE 107</b>	BELMONT	<b>KA 102</b>	KAVO (Atlantica, Esticart)
<b>CA 108</b>	CASTELLINI (Trix, Sufi)	<b>KA 103</b>	KAVO (1040/1060, # 57305-20/-30)
<b>CA 109</b>	CASTELLINI (Skema, Solar, Polo, Area, Firma)	<b>KA 138</b>	KAVO ohne Licht (1065/1066, # 77305-00/-10)
<b>CA 136</b>	CASTELLINI (Threesteril, Multisteril)	<b>KA 139</b>	KAVO mit Licht (1065/1066, # 77300-00/-10/-20)
<b>CE 153</b>	CEFLA (Serie 2012, Anthos, Stern Weber, Castellini)	<b>LU 142</b>	LUZZANI (Minimatic)
<b>CH 132</b>	CHIRANA	<b>LU 146</b>	LUZZANI (Cefla F3, F6, 2007, Anthos, Stern Weber)
<b>DC 110</b>	DCI (DCI, Belmont, Press Ring Spritzen)	<b>LU 135</b>	LUZZANI (Minilight F3 F6, Minimate F3 F6, Eurodent, Flex, Planmecca)
<b>DE 111</b>	DENTAL EZ	<b>SM117</b>	SIEMENS (Sprayvit 4000, A1, E1, M1)
<b>EN 124</b>	ENGLE	<b>SM118</b>	SIEMENS (Sprayvit II, Sirodont)
<b>FA 125N</b>	FARO (SR3)	<b>SM119</b>	SIEMENS (Sprayvit E)
<b>FA 126</b>	FARO (Metallspritze; ggf. Ultradent)	<b>SE 137</b>	SIRONA (Sprayvit, C-Reihe)
<b>FA 145</b>	FARO (SYR3)	<b>RT 115</b>	ITTER

## Nachfüllpackungen

<b>PT100</b>	Einzelpackung mit 250 Pro-Tip Turbo Einwegansätzen	<b>64,90 €</b>	Menge: <input type="text"/>
<b>PT150</b>	Bulkpackung mit 1.500 Pro-Tip Turbo Einwegansätzen	<b>329,00 €</b>	Menge: <input type="text"/>

## Pro-Syringe

<b>PT701</b>	Pro-Syringe Dreiwegspritze mit integriertem Adapter	<b>170,50 €</b>	Menge: <input type="text"/>
--------------	---	-----------------	-----------------------------

## Pro-Tip Barrier Sleeve

<b>PTS150</b>	Box mit 250 Einweg-Schutzhüllen für die Multifunktionsspritze	<b>13,90 €</b>	Menge: <input type="text"/>
---------------	---	----------------	-----------------------------

Die Preise sind bis 31.12.2018 gültig und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtum und Preisänderung vorbehalten.

Praxisstempel/Kontaktdaten:

Mein Depot:



LOSER & CO GMBH • VERTRIEB VON DENTALPRODUKTEN  
BENZSTRASSE 1c, D-51381 LEVERKUSEN  
TEL.: +49 (0) 21 71 / 70 66 70 • FAX: +49 (0) 21 71 / 70 66 66  
e-mail: info@loser.de • www.loser.de