

Die Form der Zukunft

neoss®

Ästhetisches Heilungsabutment
mit ScanPeg

Intelligent Simplicity

Ästhetisches Heilungsabutment mit ScanPeg

Ein vollständiges Sortiment anatomisch geformter Heilungsabutments aus PEEK mit einem eigenen ScanPeg zum vereinfachten und präzisen intraoralen Scannen.



Vereinfachte Handhabung – schnellerer, verbesserter Ablauf

- Minimierter Komponentenaustausch
- Rationelles intraorales Scannen
- Geringere Behandlungszeit, weniger Behandlungsschritte

Patientenfreundlicher und ungestörte Einheilung

- Die "biologische Abdichtung" bleibt erhalten, das Gewebeniveau wird erhalten
- Weniger invasiv für mehr Patientenkomfort

Anatomisch geformt, um hervor- ragende Ästhetik zu erreichen


- Formt das Weichgewebe im Verlauf der Heilung
- Perfekt passend zu den definitiven Neoss-Esthetiline-Abutments und den individualisierten Abutments von Neoss

Ein eleganter, effizienter
Ablauf für Sie

Eine angenehmere
Erfahrung für Ihre Patienten

01 Heilungsabutment einsetzen

Das ästhetische Heilungsabutment wird beim Erst- oder Zweiteingriff eingesetzt und belassen, bis das endgültige Abutment eingesetzt wird.

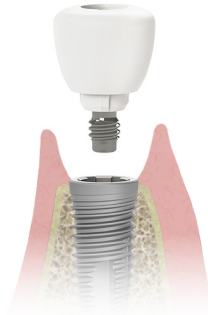


02 ScanPeg einsetzen und scannen

Unter Verwendung des ScanPeg wird ein präziser Intraoralscan auf Heilungsabutment-Niveau durchgeführt.


Der ScanPeg wird in einer Packung mit dem ästhetischen Heilungsabutments geliefert und ist einfach zu montieren und zu entfernen.

Mit Ihrem vorhandenen Intraoralscanner kann die intraorale digitale Abformung zum Zeitpunkt Ihrer Wahl durchgeführt werden.

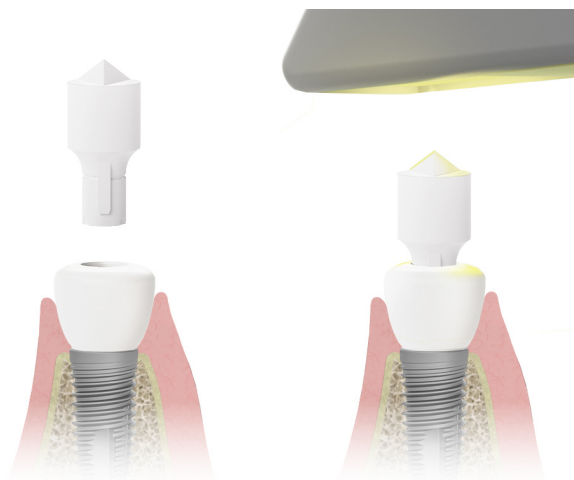

03 Einsetzen der definitiven Restauration

Die zeitliche Flexibilität bei der digitalen Abformung ermöglicht es, dass die Konstruktionsarbeit während der Einheilungsphase fortgesetzt werden kann. Das ästhetische Heilungsabutment wird nicht abgenommen, bis die endgültige Restauration eingesetzt wird. So entfällt ein kompletter Eingriff.

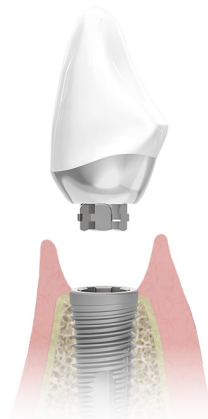

Dieses neue Sortiment ästhetischer Heilungsabutments mit Möglichkeiten zum intraoralen Scannen ist ein weiteres Beispiel für die Umsetzung unseres einzigartigen Konzepts „Intelligente Einfachheit“. Innovative und wirksame Lösungen, die Sie und Ihre Patienten in den Mittelpunkt stellen.

Art. Nr.	Beschreibung
31360	Ästhetisches Heilungsabutment mit ScanPeg – Mittlerer Schneidezahn
31361	Ästhetisches Heilungsabutment mit ScanPeg – Seitlicher Schneidezahn
31362	Ästhetisches Heilungsabutment mit ScanPeg – Eckzahn
31363	Ästhetisches Heilungsabutment mit ScanPeg – Prämolar Ästhetisches
31364	Ästhetisches Heilungsabutment mit ScanPeg – Molar
31365	ScanPeg – 5 Stück

Teil des Neoss Esthetiline-Sortiments

Für Informationen über die Verfügbarkeit und eine Liste der kompatiblen Scanner und Konstruktionsprogramme wenden Sie sich an Neoss.

Kontaktinformationen

Australien

Neoss Australia Pty. Ltd
PO Box 404
New Farm
QLD 4005
T +61 7 3216 0165
F +61 7 3216 0135
E info.au@neoss.com

China

Shanghai LegenDental Medical Technology Co. Ltd
4th floor, Block 6
1525 Minqiang Road
Songjiang District
Shanghai 201612
P. R. China
T +86-21-67657130
F +86-21-67657131
E info@legendental.cn

Dänemark

Neoss AB
T +46 (0)31 88 12 80
E info@neoss.se

Deutschland

Neoss GmbH
Im MediaPark 8
DE-50670 Köln
T +49 221 55405-322
F +49 221 55405-522
E info@neoss.de

Irland

Neoss Ltd
T +44 1423 817-733
F +44 1423 817-744
E info@neoss.com

Italien

Neoss Italia S.r.l.
Via Marco Antonio Colonna, 42
I-20149 Milano
T +39 02 92952 1
F +39 02 92952 250
E italia@neoss.info

Japan

Neoss Japan Co.
Y101 Building 5F
No. 1-4 Kanda-Sudacho Chiyodaku
Tokyo 101-0041
T +81 3 5289 3511
F +81 3 5289 3512

Kroatien

Medical Intertrade d.o.o
10431 Sveta Nedelja
HRVATSKA
T +385 1 33 74 020
F +385 1 33 36 035
E dental@medical-intertrade.hr

Naher Osten & Afrika

Neoss Limited
30th Floor Office 19, Reef Tower JLT Cluster (O)
Dubai
P.O. Box 5003315
United Arab Emirates
T +971 4 448 75 77
F +971 4 448 71 12
E info.me@neoss.com

Neuseeland

Neoss Australia Pty. Ltd
T +61 7 3216 0165
F +61 7 3216 0135
E info.au@neoss.com

Niederlande

Rotor, Medical Supplies
Economiestraat 16
NL-6135 KV Sittard
T +31-46-481 12 03
F +31-46-481 12 04
E mail@rotor-medical.com

Norwegen

Neoss AB
T +46 (0)31 88 12 80
E info@neoss.se

Österreich

Neoss GmbH
T +49 221 55405-322
F +49 221 55405-522
E info@neoss.de

Schweden

Neoss AB
Arvid Wallgrens backe 20
SE-413 46 Göteborg
T +46 (0)31 88 12 80
E info@neoss.se

Schweiz

Flexident AG
Amlehnstr. 22
CH-6010 Kriens
T +41413104020
F +41413104025
E info@flexident.ch

Spanien

Formación, Gestión Y Rendimiento, S.L
C. Londres 54 E2B
ES-08036 Barcelona
T +34 931 408 770
E info@fgrdental.com

Thailand

ACTEON (Thailand) Limited
23/45 Sorachai Building,
16th Floor Sukumvit 63 Road
Klongton Nua - Wattana
BANGKOK 10110
T +66 2 714 3295
F +66 2 714 3296
E info-thailand@acteongroup.com

Türkei

Neoss Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi
Küçükbakkalköy mh. Kocasinan cad. No:4
1 Atasehir
34750 Istanbul
Turkey
T +9 0216 504 3 444
E info@neossshi.com

Vereinigte Staaten

Neoss Inc.
21860 Burbank Blvd.,
Ste. 190 (North Entrance)
Woodland Hills, CA 91367
T +1 866 626-3677
F +1 818 432-2640
E contact.usa@neoss.com

Vereinigtes Königreich

Neoss Ltd
Windsor House
Cornwall Road
Harrogate
HG1 2PW
T +44 1423 817-733
F +44 1423 817-744
E info@neoss.com