


Bohrsequenzen für BTI Interna® Implantate




3.0 PLATTFORM





Ø2,5 mm Implantate

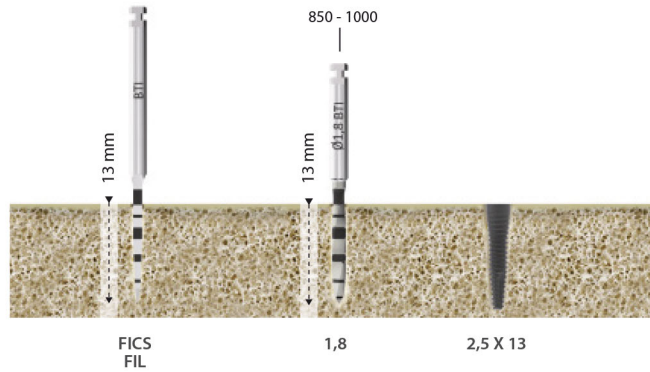

Ø3,0 mm Implantate

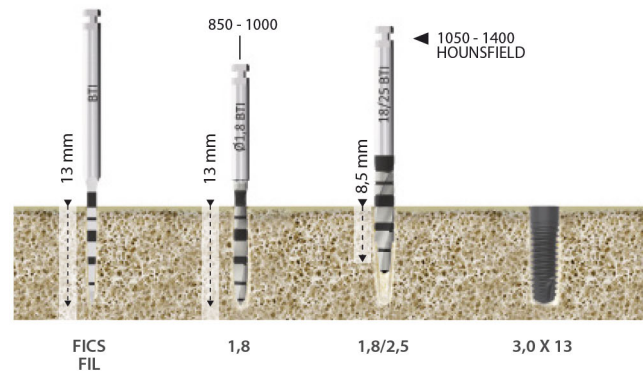


Ø3,3 mm Implantate

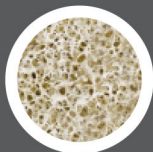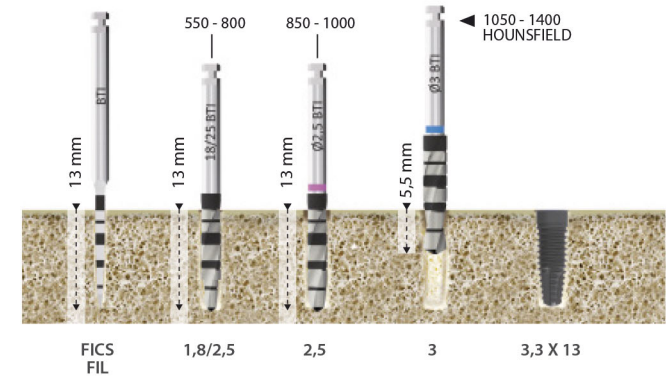

Klasse	Hounsfield
I	1050 - 1400
II	850 - 1000
III	550 - 800
IV	400 - 500
V	100 - 350

POSITIONEN DER LASERMARKIERUNGEN

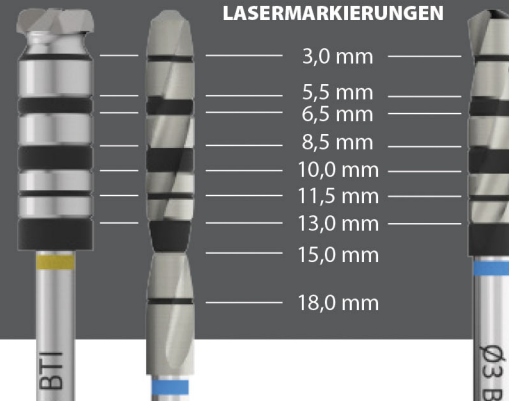

BOHRER	UMDREHUNGSZAHL	KÜHLUNG
Initialbohrer	800 - 1.000 U/min	ja
Spiralbohrer	50 - 75 U/min	nein
Versenker	150 - 200 U/min	nein