

# Behandlungsleitfaden für die Zahnaufhellung mit Opalescence™

Mit den Produkten der Opalescence-Familie können alle Zähne und jedes Lächeln aufgehellt werden.  
Mit diesem Leitfaden ermitteln Sie den optimalen Behandlungsplan für Ihre Patienten.



ANWENDUNGSGEBIETE	10% CP	16% CP	45% CP	6% HP	40% HP	35% HP
Gelb/braun (A4-B1)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Grau/braun (C4-C1)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Braun/orange Flecken	✓	✓	✓	✓	✓	X
Weißer Flecken	✓	✓	✓	✓	✓	X
Tetrazyklin	✓	✓	X	X	✓	X
Hypersensibilität	✓	X	X	✓	X	X
Endodontisch behandelte Zähne	X	X	X	X	✓	✓
Non-vitale Zähne, die nicht endodontisch behandelt wurden	✓	✓	✓	X	✓	X

Dies ist eine allgemeine Behandlungsübersicht. Die Ergebnisse können unterschiedlich ausfallen und hängen sowohl von der Mitarbeit des Patienten, als auch von der spezifischen Reaktion der Zähne auf die Behandlung ab. Um einen passenden Behandlungsplan zu erstellen, muss die Verfärbung korrekt bewertet werden. Die Behandlung selbst richtet sich nach der Art der Verfärbung. Erscheinen einige Zähne beispielsweise grau, so stellt sich nach einer eingehenden Untersuchung ggf. heraus, dass dies auf die Transluzenz und nicht auf die Zahnfarbe zurückzuführen ist. In diesem Fall muss die Zahnaufhellung genau überwacht werden, da durch das Entfernen der Verfärbung die Transluzenz des Zahnschmelzes zum Vorschein kommen kann. Dadurch erscheinen die Zähne dunkler. Bei einigen Verfärbungen dauert die Aufhellung länger, z.B. erfordern altersbedingte oder Tetrazyklinverfärbungen bekanntermaßen längere Behandlungszeiten. Bei Empfindlichkeiten oder Reizungen des Weichgewebes sollte der Patient ein rezeptfreies topisches Narkosegel zur oralen Anwendung oder Vitamin-E-Öl verwenden.

## Opalustre



Opalustre™ Paste mit 6,6 % Salzsäure enthält Siliziumcarbidpartikel zur chemischen Verbesserung des ästhetischen Erscheinungsbilds. Die Mikroabrasion sorgt für eine minimal-invasive, dauerhafte Entfernung von oberflächlichen Schmelzfehlern, leichter Fluorose oder Demineralisation.

#1  
IN DER  
PROFESSIONELLEN  
ZAHNAUFHELLUNG  
WELTWEIT



# Zahnaufhellungsprotokoll für empfindliche Zähne

Bei manchen Patienten kann es während der Zahnaufhellung zu Empfindlichkeiten kommen. Leidet ein Patient an empfindlichen Zähnen oder reagiert er positiv auf Berührungen oder Luftströme, so können die folgenden Maßnahmen getroffen werden:

Vor der Behandlung	Während der Behandlung	Nach der Behandlung
Enamelast™ Fluoridlack Opalescence™ Zahncreme für empfindliche Zähne	Opalescence™ Zahncreme für empfindliche Zähne UltraEZ™ Desensibilisierungsgel	Enamelast™ Fluoridlack Opalescence™ Zahncreme für empfindliche Zähne UltraEZ™ Desensibilisierungsgel



URSACHEN	Enamelast	Zahncreme	UltraEZ	Individuelle Schiene
Dentinexposition	✓	✓	✓	✓
Allgemeine Empfindlichkeit	✓	✓	✓	✓*
Hypersensibilität	✓	✓	✓	✓*
Gewebereizung	X	X	X	✓**

\* Bei anhaltenden Empfindlichkeiten sollten die Tragezeit oder die Konzentration des Aufhellungsgels verringert werden. Individuelle Schienen können auch mit Desensibilisierungsgel und/oder verschreibungspflichtigen Behandlungen zu Hause verwendet werden, um die Symptome zu lindern.

\*\* Anatomisch geformte individuelle Schienen verhindern, dass das Aufhellungsgel mit dem Weichgewebe in Kontakt kommt.

Verspürt der Patient Empfindlichkeiten nach der Zahnaufhellung, sollte nicht sofort poliert werden.

Kosmetische Zahnaufhellungsbehandlungen sind für Personen ab 18 Jahren (EU-Kosmetikrichtlinie ) mit bleibenden Zähnen geeignet.

Folgen Sie uns!

