

Dosieranleitung



	DesNet + BIB forte eco	DesNet + Alpron BIB forte eco	DesNet + AlproJet-DD BIB forte eco	BIB forte eco AlproSol	AlproSol DesNet+	DesNet + AlproSol AlproJet-D AlproJet-W TarClean	TarClean	TarClean
benötigte Gebrauchslösung	0,5 %	1,0 %	2,0 %	3,0 %	4,0 %	5,0 %	10 %	20 %
1 Liter	5 ml	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml	100 ml	200 ml
2 Liter	10 ml	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	100 ml	200 ml	400 ml
3 Liter	15 ml	30 ml	60 ml	90 ml	120 ml	150 ml	300 ml	600 ml
4 Liter	20 ml	40 ml	80 ml	120 ml	160 ml	200 ml	400 ml	800 ml
5 Liter	25 ml	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	250 ml	500 ml	1.000 ml
6 Liter	30 ml	60 ml	120 ml	180 ml	240 ml	300 ml	600 ml	1.200 ml
7 Liter	35 ml	70 ml	140 ml	210 ml	280 ml	350 ml	700 ml	1.400 ml
8 Liter	40 ml	80 ml	160 ml	240 ml	320 ml	400 ml	800 ml	1.600 ml


Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter www.alpro-medical.de zur Verfügung. Natürlich können Sie auch unsere Außendienstmitarbeiter telefonisch oder per E-Mail kontaktieren.

Hautschutz- und Händedesinfektionsplan

gemäß Verfahrensanweisung z.B. MKG/Chirurgie

Was	Wann	Womit	Wie
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • vor Arbeitsbeginn • nach Pausen • bei sichtbarer Verschmutzung • nach Kontakt mit Gefahrstoffen Händewaschen auf ein Minimum beschränken	CREMANA®-wash 	Schmuck an Händen und Unterarmen ablegen. Waschlotion aus geeignetem Spender auf den feuchten Händen aufschäumen, keine Bürste verwenden. Mit handwarmem Wasser gut abspülen und Hände sorgfältig abtrocknen.
Schutz	Vor einer die Haut belastenden Tätigkeit. Hautschutzprodukte sind kein Ersatz für Schutzhandschuhe. (Aufbau einer Sperrschicht vor mechanischer Belastung, Schadstoffen, Aufquellen der Haut)	CREMANA®-derm protect 	Gleichmäßig auf die gewaschene und trockene Haut auftragen. Für ausreichenden Schutz der Hände etwa eine kirschkerngroße Menge, ausgehend von den Handrücken zu den Handinnenflächen, verteilen.
Desinfektion	Bei tatsächlicher wie fraglicher Kontamination der Hände mit erregershaltigen Materialien. Auch bei Benutzung von Handschuhen! Unterschied hygienische/chirurgische Desinfektion beachten!	Hygienische und chirurgische Händedesinfektion AlproSept-HDE 	Präparat in die hohlen, trockenen Hände geben und gemäß Standard-Einreibemethode (EN 1500 für hygienische- bzw. EN 12791 für chirurgische Händedesinfektion) über die gesamte Einwirkzeit hinweg einreiben und Hände dabei feucht halten.
Handschuhe	Bei möglichem Kontakt mit erregershaltigem Material (Blut, Sekrete, Ausscheidungen). Bei allen Arbeiten mit Desinfektions- und Reinigungslösungen. Achtung: Handschuhstulpen umschlagen.	Je nach Arbeitsbereich: allergenarme, möglichst ungeduderte, gegebenenfalls flüssigkeits- bzw. chemikaliendichte, stichsichere Handschuhe	Handschuhe stets mit vollständig trockenen Händen anziehen. Tragedauer gemäß Herstellerangaben. Beschädigte bzw. von innen feuchte Handschuhe schnellstmöglich wechseln.
Pflege	Nach einer die Haut belastenden Tätigkeit. Insbesondere vor Arbeitsbeginn, in den Pausen und nach Arbeitsende.	CREMANA® Creme-Lotion 	Nach der Händereinigung/Dekontamination (Arbeitspausen/-ende) eine kirschkerngroße Menge auf den Handrücken geben und gründlich eincremen.

Hygienische Händedesinfektion gem. EN 1500 jeder Schritt mind. 5 s

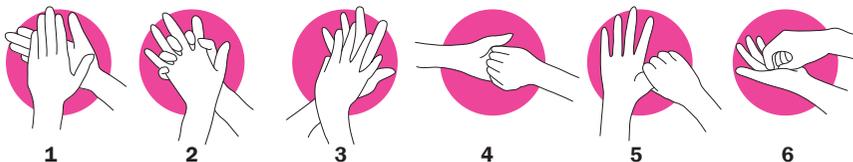

Chirurgische Händedesinfektion gem. EN 12791 mind. 3 min



Hygieneprotokoll für die Haut- und Händedesinfektion

