

LyDenti®

# Zahnaufhellung mit LyDenti®

schnell, effizient und modern

Michael Ochman, Inhaber und Experte

# Über uns

- ▶ Dentalvertrieb von Zahnaufhellungs- und Endodontieprodukten
- ▶ Über 10 Jahre Erfahrung und Pionier im Bereich der Zahnaufhellung in Deutschland
- ▶ Produkt Know-How und geschultes Personal u.a.
  - ▶ Michael Ochman - Selfmade-Mann mit zahnmedizinischer Ausbildung
  - ▶ Georg Benjamin - Zahnarzt mit endontischer Spezialisierung
  - ▶ Virginie Lehmann - Büroorganisation und Einkauf
- ▶ Unsere Stärke: Wir sind für Sie da - qualifiziert und preisorientiert



# Equipment



## LyDenti LED-Whitening Lampe

- ✓ LED-Licht mit einer Wellenlänge von 480 - 520 Nanometern → optimale Spanne zur effektiven Zahnaufhellung
- ✓ Keine UV-Strahlung oder übermäßige Hitzeabgabe
- ✓ Keine Chip-Technik
- ✓ LEDs mit hoher Lebensdauer
- ✓ Individuelle Einstellung der Lichtintensität mgl.
- ✓ 2 separat laufende LED-Reihen
- ✓ Lampenkopf flexibel und leicht einstellbar



## LyDenti® Whitening Gel EXTRA

- ▶ hochwertiges, für die professionelle Zahnaufhellung entwickeltes Material
- ▶ Whitening Gel besteht aus 38%-igem Wasserstoffperoxid
- ▶ direkt applizierbar dank einfach zu bedienender Doppelkammerspritze
- ▶ eignet sich besonders für die Behandlung von durch Tetrazyklin oder Fluorid verfärbten/ fleckigen Zähnen
- ▶ neutraler PH-Wert (8)
- ▶ Verpackung:  
1 X Doppelkammerspritze LyDenti® Whitening Gel Extra 38% (5 ml) einschl. Mischkanülen  
5 X Doppelkammerspritzen LyDenti® Whitening Gel Extra 38% (5 ml) einschl. Mischkanülen + 2 X LyDenti® Protective Kofferdamm einschl. Aufsätzen

## LyDenti® Wangenabhalter

- ▶ Wangenabhalter mit 4-Fach-Schutz
- ▶ sanftes Material für maximalen Tragekomfort
- ▶ nicht sichtbar bei Röntgenaufnahmen
- ▶ ideal für klinische Anwendungen, Bestimmung der Zahnfarbe, Dentalfotografie und restaurative Behandlungen geeignet
- ▶ wieder verwendbar durch Kalt-Sterilisation oder Desinfektion (nicht autoklavierbar)
- ▶ Größen: S und L



# Kontakt

LyDenti®

Michael Ochman

Schöppinger Str. 12

12207 Berlin

Tel.: 030 34668 150

E-Mail: [info@lydenti.de](mailto:info@lydenti.de)

[www.lydenti.de](http://www.lydenti.de)

[www.lydentishop.de](http://www.lydentishop.de)

auch bei:



## LyDenti® Behandlungsablauf

1. Zuerst wird dem Patienten Lippenbalsam aufgetragen und der Mundspanner eingeführt
2. Danach kann die Gesichtsgaze um den Mundspanner befestigt werden



### 3. Bestimmung der Ausgangsfarbe



### 4. Zur Vorbereitung werden Gingiva und Zähne abgetrocknet



# LyDenti®

5. Auftragen des LyDenti® Protective Kofferdams (2-3 mm dicke Schicht entlang des Zahnfleischrandes)



6. Aushärtung des Kofferdams bei stetiger Bewegung der Polymerisationslampe für 20-30 s



# LyDenti®

7. Wiederholung Schritt 5 und 6 beim oberen Zahnfleischrand



# LyDenti®

8. Patientenschutzbrille aufsetzen und LyDenti® Whitening Gel auftragen (Konsistenz vorher prüfen!)



9. LyDenti® LED Whitening Lampe im 90° Winkel zum Gebiss positionieren und 1. Zyklus à 12-15 Min beginnen



# LyDenti®

10. Nach Abschluss des 1. Zyklus,  
Bleachinggel absaugen/abtragen.  
(Nicht spülen!)



11. Es wird noch 2 weitere Male  
Bleachinggel aufgetragen und ein  
Zyklus à 12-15 Min durchgeführt.  
(d.h. insgesamt 3 Zyklen)



# LyDenti®

12. Nach Ablauf des letzten Zyklus, Bleachinggel absaugen/ abtragen, Kofferdam u. Gesichtsgaze entfernen und Patientenschutzbrille abnehmen. (gründlich mit lauwarmen Wasser spülen)



# LyDenti®

## 13. Aktuelle Zahnfarbe bestimmen

